

ORRSZI PORSZI

– Porszívós orrszívó készülék –

HU


- Az orrszívó fej kialakítása biztonságos.
- 5 részre szedhető, így rendkívül könnyen tisztítható csap alatt.
- Sterilizálható forralással, vagy sterilizáló folyadékba áztatva (a készülék minden darabja hőálló anyagból készült).
- Helyes használat mellett az orrváladék nem tud bejutni az orrszívó készülékének csövébe, továbbá a porszívó gégecsövébe sem.
- Helyes használata: a szívófejet úgy tartjuk a kezünkben, hogy a szilikon cső felfelé nézzen (lásd a mellékelt ábrán).
- Műanyagból és üvegből is választható.
- Műanyagból szetten is kapható, ami egy készüléket, kétféle szívófejet és egy tisztítókefét tartalmaz.
- Nem tartalmaz az egészség számára káros anyagot.
- Magas szintű minőség, kedvező áron.
- Gyermeorvosok és fül-orr-gégész szakorvosok ajánlásával.

Az Orrszi Porszi részei

Műanyag

- Szívófej

• Váladékgyűjtő (belső henger alakú gyűjtőtartály, ami a szívófejről leválasztható; külső tartály, amihez csatlakozik a szívófej, és aminek az oldalához csatlakozik a szilikon cső) • Szilikon cső (rugalmas) • Harang alakú csatlakozó porszívóhoz

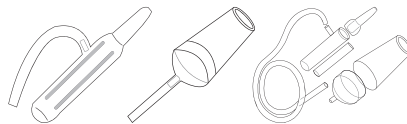

Az orrszívás lépései

1. Előkészületek: Helyezzük a porszívót áram alá (dugjuk be a kábeltorba a zsinórt), majd helyezzük a szívás helyszínéhez olyan közelségbe, hogy kezünk, vagy lábunk számára bekapcsoláshoz elérhető távolságba legyen.
2. A mellékelt ábra szerint szereljük össze a készüléket, és helyezzük bele a harang alakú csatlakozót a poszívó csövébe, hogy már csak bekapcsolni kelljen a porszívót.
3. A baba mindkét orrnyílásba fújunk Orrszi Porszi Orrtisztító Folyadékot – fiológias sóoldatot (0,9%-os só oldat, ami testazonos, megegyezik a könny összetételével. Nem csip, nem irritál, csak nedvesít, felhajtja a váladékot) – majd 3 perc elteltével a megnedvesített orrnyálkahártya és fellazult orrváladék eltávolítása elkezdődhet. A befújással az esetlegesen orrfalra száradt váladékot oldjuk, így biztonságosan, nyálkahártya sérülése nélkül tudjuk végezni az orrszívást.
4. Vegyük fel a kornak megfelelő helyes tartási pozíciót.



Orrsívás újszülött és csecsemő esetén

4. a.) Ülünkbe ülve a gyermek mellé, hátát megtámasszuk, tenyerünkbe fejét egyenes állásba tartva a babát félig ülő helyzetbe emeljük. Fontos, hogy ne hanyattfekvésben, esetleg hátrafejezett, vagy az ellenállás miatt hátra feszített fejjel legyen a baba, mert, nehezíti az orrváladék eltávolítását. Ilyenkor a váladék a gravitáció miatt a garat irányába hátracsorog. Helyes testtartás esetén a váladék a szívás irányába, az orrfenek felé indul el, megkönnyítve ezzel a gyors és hatékony váladékátvázást.

Újszülötteknél és csecsemőknél még nincs olyan sok, és olyan sűrű váladék, hogy tökéletes vákuumot kelljen képezni, tehát nem kell leszorítani az ellentétes orrnyílást. Ez ebben a korban különben sem lenne kivitelezhető, hiszen abban a pillanatban, hogy egyik orrnyílást az orrszívó, másik orrnyílást az orrcimpa orrszívónyelvéhez komprimálása zárja le, a baba azonnal kinyitja a száját.



Orrsívás kisdét és kisgyermekkorban

4. b.) Ülünkbe ülve a gyermek mellé, hátát megtámasszuk, tenyerünkbe fejét egyenes állásba tartva a babát félig ülő helyzetbe emeljük. Fontos, hogy ne hanyattfekvésben, esetleg hátrafejezett, vagy az ellenállás miatt hátra feszített fejjel legyen a baba, mert, nehezíti az orrváladék eltávolítását. Ilyenkor a váladék a gravitáció miatt a garat irányába hátracsorog. Helyes testtartás esetén a váladék a szívás irányába, az orrfenek felé indul el, megkönnyítve ezzel a gyors és hatékony váladékátvázást.

Újszülötteknél és csecsemőknél még nincs olyan sok, és olyan sűrű váladék, hogy tökéletes vákuumot kelljen képezni, tehát nem kell leszorítani az ellentétes orrnyílást. Ez ebben a korban különben sem lenne kivitelezhető, hiszen abban a pillanatban, hogy egyik orrnyílást az orrszívó, másik orrnyílást az orrcimpa orrszívónyelvéhez komprimálása zárja le, a baba azonnal kinyitja a száját.



Újszülötteknél és csecsemőknél még nincs olyan sok, és olyan sűrű váladék, hogy tökéletes vákuumot kelljen képezni, tehát nem kell leszorítani az ellentétes orrnyílást. Ez ebben a korban különben sem lenne kivitelezhető, hiszen abban a pillanatban, hogy egyik orrnyílást az orrszívó, másik orrnyílást az orrcimpa orrszívónyelvéhez komprimálása zárja le, a baba azonnal kinyitja a száját.

5. Kapcsoljuk be a porszívót. Az Orrszi Porszi kialakításának köszönhetően állandó, 0,2 bar szívónyomással szív, ami teljesen biztonságos akár újszülöttek orrának leszívásához is.
6. Helyezzük a szívófejet megfelelő módon az orrnyílásához.

Az orrszívó orrnyílásba helyezése, helyes használata

A szívófejet fogjuk jobb kezünkbe, hogy a szilikon zsinór (az orrszívó dobozán ábrázolt módon) felfelé álljon. Ez fontos ahhoz, hogy megakadályozzuk az orrváladék zsinór felé haladását, így a készülék higiénikus marad, és csak a szívófejet és a gyűjtő tartályt kell elmosni, a szilikon csövet nem. A szívófejet helyezzük a külső orrjáratához, az orrnyílásba illesztve addig, amíg a küp kialakítás engedli. Nem kell mélyre tolni, erőltetni, mert a hatékonyság nem ezen múlik. A szívófejet lefelé és oldal irányú állásba tartjuk, hogy az orrfenekre csorgott váladékot maradéktalanul el tudjuk távolítani.

Egy huzamban folyamatosan maximum 5 másodpercig végezzük a szívást. Ha ennyi nem elég, ezt az 5 másodperces szívást 3-5 másodperces szünetekkel többször egymás után elvégezzük, de célszerű addig, amíg újabb adag váladék jelenik meg a tartályba.

7. Vegyük el a készüléket az orrnyílástól.

8. Kapcsoljuk ki a porszívót.

9. Itassuk fel puha zsebkendővel az orrkörnyékről a kifolyt orrcseppet, vagy orrváladékot, ha szükséges.

10. Szükség esetén kenjük be a baba orrának környékét vékonyan Sudocrem bőrvédő krémmel, amivel megelőzhetjük az orrváladék okozta kipirosnodást vagy irritációt.

11. Csatlakoztassuk le az orrszívót a porszívóhoz.

12. Szedjük darabokra a szívófejet és csap alatt folyó vízzel mosjuk el. Ha szükséges, kifőzhetjük, vagy más módon (pl. Sterilizáló folyadékba áztatva) sterilizálhatjuk is. Tisztításkor a gyűjtőtartályról csatlakoztassuk le a szívófejet, a tisztítás hatékonysága miatt a szívófej is szétcsapható. Az Orrszi Porszi 5 különálló részre szedhető, amely nagy segítség a tisztántartásban, jelentősen növeli az orrszívó sterilizálását is.


13. Miután az alkatrészek megszáradtak, tegyük el tiszta helyre, így következő alkalommal azonnal használható lesz.



Az Orrszi Porszi az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet által bevizsgált termék. Forgalmazza: CEUMED Kft., 1138 Budapest, Margitszigeti Grand Hotel IV/6.



Ranyák György
H-1094 Budapest, Tompa u. 15/B
www.ranyak.eu

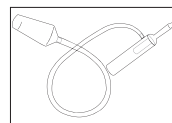

Ver. 2 – 2013/05